

表情を隠さない防曇透明マスク

# ルカミィ<sup>®</sup>

特許取得商品  
【発明の名称】  
透明マスク

**Sサイズ**ができました！  
(こども・女性向き)



フィルムが曇らない

顔の表情がよくわかる



☆☆こんな時にルカミィをご利用ください☆☆

コミュニケーション



イベント・発表会



授業中



・大人用・こども用

## 880円(税込)



▲ルカミィの紹介動画はこちら

■マスク

- ・フリーサイズ(大人用):約17×12cm(フィルム部)
- ・Sサイズ(こども用):約15×10cm(フィルム部)
- ・材質:防曇フィルム、不織布、ゴム
- ・ストッパー材質:プラスチック

■専用ケース

- ・サイズ:約15×12.5cm
- ・材質:合成皮革

ルカミィ(専用ケースセット)

## 1,100円(税込)



- ◎ルカミィは透明部に特殊な化学的防曇処理をした硬質セルロースフィルムを使用。
- ◎防曇スプレーを塗布した一般の防曇フィルムは何回か使用したり拭き取ると防曇性能が落ちてくるのに対し、ルカミィは繰り返し使用しても、拭き取っても高い防曇性能が持続します。
- ◎ルカミィは自然のウェットマスク。装着中にマスク内部は湿度が上昇し、この時薄い水の皮膜の結露が発生し防曇性が現れます。この湿度がウィルスを不活性化します。

### ルカミィご使用上の注意点

- ルカミィは使用後、洗って頂ければ繰り返しお使い頂けるマスクです。
- 壊れたら新しいマスクに取り替えてください。
- 不織布は手洗いで、十分に乾かしてからお使いください。
- 透明フィルムは中性洗剤を使用しないでください。中性洗剤を使用すると防曇効果が弱くなります。
- 使用を中断または終える際は、手洗いし清潔にしてからケース(別売)に入れて保管してください。
- 強い衝撃を与えないで下さい。破損の原因となります。
- 使用中に皮膚に異物が発生した場合は、すぐにご使用をおやめください。
- 呼吸で透明フィルム内側が濡れることがあります。その場合は乾いた布で優しく拭き取ってください。
- 持ち運びの際はポケットに入れたり、折り曲げたりしないでください。破損の原因になります。
- 持ち運びや保管は専用のケースに入れることをおすすめします。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
- ご使用中に息のしづらさ、曇さを感じた時は一度外してください。